


5.4 Forsendelse

Pakkevejledning for blodprøveforsendelse i flamingoemballage

Vejledningen er godkendt af Post Danmark og skal derfor følges

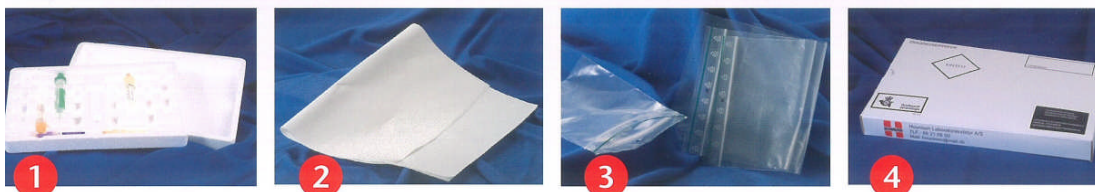

1. Rørene lægges i flamingoæskan.
2. Sugeindlægget lægges oven på rørene. Herover placeres rekvisitionerne (ikke vist).
3. Flamingoæskan lukkes og lægges i lynlåsposen.
4. Flamingoæskan placeres i papsvøbet. Lynlåsposen lukkes først når æskan er placeret i papsvøbet, så er luften presset ud.
5. Papsvøbet lukkes og forsegles med tape eller en elastik, som føres rundt om pappet på det længste mål.

Flamingoemballage og papsvøb genbruges flere gange.

Kan postes i almindelig postkasse som brevforsendelse. Der skal ikke påføres porto.