



Lab. nr.

Kvalitetsvurdering af patientnære analyser

Erstatningscpnr.	Sygesikring GR <input type="checkbox"/>	Amtskommune	Prøvetagningsdato	Prøvetagningsstidspunkt	Ptko: KK
Navn		Selvbetaler	Særlig betaler ▲ <input type="checkbox"/>		Sted: PR
Adr.		Princip: Egen måling kontrolleres ved indsendelse af prøve til KPLL Send ikke prøver om fredagen Pilestræde 65 ♦ 1112 København K Telefon 3374 4131 ♦ Telefax 3374 4120 E-mail: konsulent@kpll.dk Hjemmeside: www.kpll.dk			
Postnr.					
Tlf.					
Henvissende læge	Ydernr.				
Navn					
Adr.					
Postnr.	Tlf.				
Svar også til læge	Ydernr.				

Markér
kraftigt
med SORT
kuglepen

Nr.	Patientnær analyse	Patientnært resultat	Patientnært apparat	Prøve til KPLL
6180	Glukose i kapillærplasma (fastende)	mmol/l		Veneblod i 3 ml plastrør med pink prop (FC-mixture rør)
6190	Glukose i veneplasma	mmol/l		Veneblod i 3 ml plastrør med pink prop (FC-mixture rør)
6010	Hæmoglobin i kapillærblod (finger)	mmol/l		Veneblod i 4 ml plastrør med lilla prop (K-EDTA)
6020	Hæmoglobin i veneblod	mmol/l		Veneblod i 4 ml plastrør med lilla prop (K-EDTA)
6200	HbA1c	%		Veneblod i 4 ml plastrør med lilla prop (K-EDTA)
6210	HbA1c (IFCC)	mmol/mol		Veneblod i 4 ml plastrør med lilla prop (K-EDTA)
6140	INR i kapillærblod			Veneblod i 2,7 ml plastrør med lyseblå prop (Citratrør)
6150	INR i veneblod			Veneblod i 2,7 ml plastrør med lyseblå prop (Citratrør)

Andre plasma/serumanalyser							
Gerne flere analysetyper på sedlen. Send kun ét gelglas* (gul prop) eller ét glas med afpipetteret serum til KPLL							
Nr.	Patientnær analyse	Patientnært resultat	Patientnært apparat	Nr.	Patientnær analyse	Patientnært resultat	Patientnært apparat
6030	ALAT	U/l		6090	S-Kalium*	mmol/l	
6040	Amylase (tot)	U/l		6160	P-Kalium*	mmol/l	
6050	Bas. Phos.	U/l		6100	Natrium	mmol/l	
6060	Cholesterol	mmol/l		6110	Triglycerid	mmol/l	
6170	Cholesterol (HDL)	mmol/l		6120	Urat	mmol/l	
6070	CRP	mg/l					
6080	Creatinin	µmol/l					

* Hvis Kalium indgår, skal gelrøret være centrifugeret, ellers kan det indsendes ucentrifugeret

Supplerende undersøgelser:

Alle rørtyper:

Etiketten SKAL placeres helt oppe ved proppen, med nummeret øverst og stregkoden, som vist på tegning.



GLU	HB	HBA1c	INR	BIOKEMI			
-----	----	-------	-----	---------	--	--	--

Fremgangsmåde:

1. Lægen vælger en patient med indikation for både de aktuelle analyser og veneblodprøvetagning. Patienten skal give informeret samtykke.
2. Lægen udfører egne analyser i overensstemmelse med vejledningen for det patientnære apparat og noterer resultaterne i tabellerne.
3. Lægen udtager de relevante veneblodprøver fra patienten til kvalitetskontrollen og mærker dem med de relevante glasetiketter fra denne seddel.
4. Lægen sender samme dag sedlen og prøverne til KPLL som øvrig prøveforsendelse.
5. KPLL sender svarrapporten elektronisk eller som kumuleret papirsvaer for det aktuelle "kvalitetskontrol cpr.nr.", der dækker over forskellige patienter. Rapporten bliver mest overskuelig, hvis flere analysetyper kontrolleres på samme seddel.
6. Modtagere af elektronisk svar må evt. (afhængig af lægesystemet) hver gang selv overføre meddelelsen til et eget valgt "kvalitetskontrollerstatnings-CPR.nr.". Dvs. skifte CPR.nr. i henhold til lægesystemets procedure herfor. Det valgte nummer kan f.eks. være lægens fødselsdag: xx xx xx - *111 eller anden markering, som kan accepteres af lægens system, og som ikke har sammenfald med CPR-numre på lægens patienter. Hvis det valgte CPR-nummer anføres i rubrikken "Supplerende oplysninger" på sedlen ved næste bestilling, vil det anførte nummer fremover blive anført som fornavn ved svarafgivelserne (men ikke som CPR-nummer på svar fra KPLL).

KPLL kender ikke og skal ikke kende patienternes identitet.

Lægen kan koble kvalitetskontrolresultater til en patient ved egne notater.

Hvis lægen udover kvalitetskontrollen ønsker personidentificerbare resultater fra KPLL, skal de helt normale procedurer anvendes. Lægen skal da sende en almindelig rekvisitionsseddel med patientens rigtige navn og cpr.nr. ledsaget af andre prøver mærket med glasetiketter fra den almindelige rekvisitionsseddel.